

MedCu Αντιμικροβιακά επίθεματα τραυμάτων με οξείδιο του χαλκού (AMWDs)

Περίγραφή

MedCu Αντιμικροβιακά επίθεματα τραυμάτων με οξείδιο του χαλκού (αφιερώ: AMWDs) είναι αντιμικροβιακοί απορροφητικοί αποστειρωμένοι, μαλακοί, που απορροβώνουν επίδεσμοι τραύματος μιας χρήσης 2 ή 3 στρωμάτων που αποτελούνται από τα εξής:

- ένα εσωτερικό απορροφητικό στρώμα κυταρίνης και πολυστέρα που περιέχει οξείδιο του χαλκού
- ένα ή δύο εξωτερικά μη απορροβούμενα μη συνυφασμένα στρώματα πολυπροπυλενίου που περιέχουν οξείδιο του χαλκού.

Η μία ή η δύο εξωτερικές στρώσεις καλύπτουν την εσωτερική στρώση από τη μία ή και από τις δύο πλευρές, αντίστοιχα. Οι **επίδεσμοι 2 στρώσεων είναι καταλλήλαιοι για επανεκκαθάριση τραύματος, και οι επίδεσμοι 3 στρώσεων είναι καταλλήλαιοι για βύθλι και κοίλια τραύματα**. Το AMWD διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, όπως 10cm x 10cm ή 5cm x 5cm. Ενδέχεται και άλλα μεγέθη να είναι διαθέσιμα. Συμβουλευτείτε την επίστα για τα προϊόντος για τις ακριβείς διαστάσεις. Ο επίδεσμος έλκους μπορεί να έχει ή να μην έχει κολλητική ταινία. Ο επίδεσμος έλκους παρέχεται αποστειρωμένος με τη μέθοδο αποστείρωσης ETO, η οποία διατηρείται από την συσκευασία δεν έχει καταστραφεί η ανοχή πριν από τη χρήση. Οι επίδεσμοι MedCu απορροφούν εξίδρωμα από το τραύμα, προστατεύουν από τη μόλυνση και χρησιμεύουν ως φράγμα έναντι εξωτερικής μόλυνσης μελώντας τον κίνδυνο επιμόλυνσης του τραύματος.

Ενδείξεις

Εν αντιμικροβιακά επίθεματα τραύματος MedCu με οξείδιο του χαλκού ενδείκνυνται για τη διαχείριση των τραυμάτων και την εξασφάλιση αντιμικροβιακού φραγμού. Τα επίθεματα εφαρμόζονται τοπικά και βρίσκονται σε άμεση επαφή με το τραύμα. Οι επίδεσμοι προορίζονται για τις ακόλουθες ενδείξεις:

Ενδείξεις για χρήση χωρίς ιατρική συνταγή (OTC):

Τοπική διαχείριση επιφανειακών τραυμάτων, μικρών εγκαυμάτων, εκδορών και σχισμών ("ρήξεις").

Ενδείξεις συνταγογραφούμενης χρήσης (Rx-only):

Τραύματα μερικού και ολικού πάχους έλκη πίεσης (πύδιο I-IV), διαβητικά έλκη, έλκη από φλεβική στάση, αρθρική έλκη, εγκαύματα Ι και ΙΙ, 2ου βαθμού, χειρουργικά τραύματα, φλεβικά ή περιφερικά σημεία IV, σημεία εξωτερικής ροφθοδότης βελόνας και οξεία τραύματα όπως εκδορές, τριβές και σκισίματα δέρματος.

Αντενδείξεις:

Να μη χρησιμοποιείται σε ασθενείς με υπερευαίσθησία στο χαλκό.

Για χρήση Rx-only

Προστατεύει της επιφάνειας του τραύματος:

- Καθαρίστε και στεγνώστε καλά την περιοχή γύρω από το τραύμα πριν από την εφαρμογή του επίδεσμου ακολουθώντας τη συνήθη κλινική πρακτική.
- Εάν είναι απαραίτητο, απομακρύνετε τον νεκρωτικό ιστό πριν από την εφαρμογή του επίδεσμου.
- Ενδοστάσεις τα τραύματα με χαμηλή ή καθόλου εξίδρωση ακολουθώντας τη συνήθη κλινική πρακτική.
- Εάν είναι απαραίτητο, αντιμετωπίστε τη λοίμωξη ακολουθώντας τη συνήθη κλινική πρακτική.

Για χρήση OTC και Rx-only

Εφαρμογή του επίδεσμου:

- Επιλέξτε τον επίδεσμο κατάλληλου μεγέθους, ανοίξτε το αποστειρωμένο σκουλαρίκι από την επάνω πλευρά και αφαιρέστε ασηπτικά τον επίδεσμο έλκους.
- Εάν χρησιμοποιείτε τους επίδεσμοι τραύματος MedCu 3 στρώσεων (πορτοκαλί

και στις δύο πλευρές), εφαρμόστε οποιαδήποτε πλευρά απευθείας στην πληγή. Καλύψτε με ένα δεύτερο επίδεσμο και τυλίξτε ή ασφαλίστε με κολλητική ταινία.

- Εάν χρησιμοποιείτε τους επίδεσμοι τραύματος MedCu 2 στρώσεων (πορτοκαλί στη μία πλευρά) εφαρμόστε την πορτοκαλί πλευρά του επίδεσμου στο σημείο του τραύματος. Καλύψτε με ένα δεύτερο επίδεσμο και τυλίξτε ή ασφαλίστε με κολλητική ταινία.
- Εάν χρησιμοποιείτε τους επίδεσμοι έλκους 'MedCu με κολλητικά άκρα, δεν απαιτείται τσίλιμα ή ασφαλίση με κολλητική ταινία.
- Ο θεράπωντας ιατρός θα πρέπει να αξιολογεί κάθε έλκος και ασθενή για να καθορίσει την καλύτερη μέθοδο στέρησης τους τους επίδεσμοι MedCu.
- Ο θεράπωντας ιατρός μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε μέθοδο στέρησης σύμφωνα με την κλινική πρακτική του κέντρου

Συντήρηση αλλαγής επίδεσμου:

- Για τη συντήρηση αλλαγής του επίδεσμου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση του τραύματος και την εκτίμηση του θεράποντα ιατρού.

- Τα MedCu AMWDs μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους για έως και 7 ημέρες.

Αλλαγή και αφαίρεση επίδεσμου:

- Τα MedCu AMWDs πρέπει να αλλάζονται εάν παρατηρούνται σημάδια κορεσμού του επίδεσμου ή σύμφωνα με την κλινική πρακτική που ακολουθείτε στο κέντρο και τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

- Για να αλλάξετε τους μη αυτοκόλλητους επίδεσμοι MedCu, αφαιρέστε τους αποστειρωμένους στέρησης ή την κολλητική ταινία και αναστρέψτε προσεκτικά τον επίδεσμο από το τραύμα. Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένο φουσιολογικό ορό, εάν χρειάζεται, για ευκολότερη αφαίρεση του επίδεσμου τραύματος.

- Για να αλλάξετε τους αυτοκόλλητους επίδεσμοι MedCu, αποκολλήστε προσεκτικά την κολλητική ταινία και αφαιρέστε προσεκτικά τον επίδεσμο από το τραύμα.

Προφυλάξεις

- Προϊόν μίας χρήσης • Να μην επαναποστεριώνεται • Για εξωτερική χρήση • Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου • Αποστειρωμένο εκτός αν η συσκευασία έχει φθαρεί
- Μη μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία είναι ανοιχτή ή κατεστραμμένη • Τα MedCu AMWDs μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μολυσμένα τραύματα που αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα του κέντρου για την καταστολή της λοίμωξης ως συμπλήρωμα της συνήθους θεραπευτικής αγωγής • Η χρήση χωρίς ιατρική συνταγή (OTC) επιτρέπεται μόνο για **επιφανειακά έλκη, μικρά εγκαύματα, εκδορές και σκισίματα**.
- Για τους άλλους τύπους τραυμάτων, τα MedCu AMWDs θα πρέπει να **συνταγογραφούνται (Rx)**.

Ερμηνεία συμβόλων

Τα σύμβολα στη συσκευασία προϊόντος θα πρέπει να ερμηνεύονται ως εξής:

	Μηνία λήξης (χρήση έως)		Προϊόν μίας χρήσης – Να μην επαναχρησιμοποιείται
	Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης		Να μην επαναποστεριώνεται
	Να μη χρησιμοποιείται αν η αποστειρωμένη συσκευασία έχει διαρραγεί		Μηνία κατασκευής
	Αποστειρώθηκε με ETO		Κατασκευαστής
	Να φυλάσσεται σε ξηρό περιβάλλον		Κωδικός / αριθμός παρτίδας
	Σύμβολο CE της ΕΕ		Αριθμός καταλόγου

Εάν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:



MedCu Technologies Ltd.
11 Galgalei Haplada,
Herzliya 4672200, Ισραήλ

info@medcu.com; www.medcu.com

MEDCu



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10
48163 Münster,
Γερμανία

